
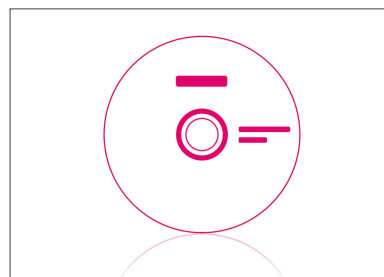
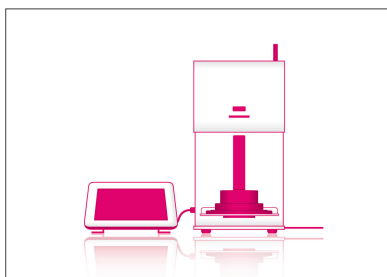


Compendio VITA Febrero 2021

Técnica de prensado

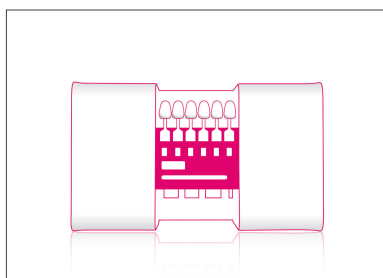

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA AMBRIA®



Descripción del producto

- Sistema de cerámica prensada de disilicato de litio reforzada con dióxido de circonio para lograr resultados altamente estéticos y estables mediante un proceso de trabajo eficiente.
- El sistema de cerámica prensada abarca pastillas de cerámica prensada en dos niveles de translucidez (T/HT) y dos tamaños (S, L), sistema de muflas, material de revestimiento y líquido, así como émbolos.

Ventajas

- Obtención de un juego cromático y lumínico brillante y rico en matices gracias a la translucidez, la opalescencia y la fluorescencia naturales del material
- Reproducción fiable de los colores dentales gracias a la excelente fidelidad cromática de las pastillas de prensado, así como a la perfecta armonización entre los componentes del sistema
- Obtención eficiente de resultados de prensado con gran precisión de ajuste gracias a la capa de reacción minimizada, ya que la cerámica y el material de revestimiento están perfectamente armonizados entre sí.
- Confección de restauraciones altamente resistentes gracias a la cerámica de disilicato de litio reforzada con dióxido de circonio y dotada de gran resistencia (> 500 MPa).

Indicaciones

Para la confección de reconstrucciones delgadas, tales como carillas, inlays y onlays, y coronas completas/parciales altamente estéticas, así como puentes de tres piezas hasta el segundo premolar.

VITA AMBRIA® Surtidos

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

**VITA AMBRIA® STARTER KIT VITA classical A1-D4®
LAMSKC1**

Cantidad	Contenido	Material
1	5 pcs	A2-T S
1	5 pcs	A3-T S
4	100 g	VITA AMBRIA® INVEST P (revestimiento, polvo)
1	100 ml	VITA AMBRIA® INVEST F (revestimiento, líquido)
4		VITA AMBRIA® PLUNGER, émbolo d.prensado de un solo uso Ø 13 mm, 1 unidad
2	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, fog
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Base de cocción W alveolar para coronas y puentes
1		2 Pernos de platino (1 perno para diente anterior y 1 para diente posterior)
1		Algodones de soporte de cocción, 2 uds.
1	60 ml	vaso graduado
1	12 ml	VITA Firing Paste envase normal

VITA AMBRIA® Productos

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

Denominación	Ref.
VITA AMBRIA®, A1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0363
VITA AMBRIA®, A2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0373
VITA AMBRIA®, A3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0383
VITA AMBRIA®, B1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0413
VITA AMBRIA®, B2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0423
VITA AMBRIA®, C2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0463
VITA AMBRIA®, D2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0493
VITA AMBRIA®, A1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0365
VITA AMBRIA®, A2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0375
VITA AMBRIA®, A3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0385
VITA AMBRIA®, B1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0415
VITA AMBRIA®, B2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0425
VITA AMBRIA®, C2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0465
VITA AMBRIA®, D2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0495
VITA AMBRIA®, A1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0363
VITA AMBRIA®, A2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0373
VITA AMBRIA®, A3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0383
VITA AMBRIA®, B1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0413
VITA AMBRIA®, B2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0423
VITA AMBRIA®, C2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0463
VITA AMBRIA®, D2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0493
VITA AMBRIA®, A1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0365
VITA AMBRIA®, A2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0375
VITA AMBRIA®, A3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0385
VITA AMBRIA®, B1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0415
VITA AMBRIA®, B2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0425
VITA AMBRIA®, C2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0465
VITA AMBRIA®, D2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0495

VITA AMBRIA® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominación	Ref.
VITA AMBRIA®, 0M1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0045
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0045

VITA PM®9



Descripción del producto

VITA PM 9 (Pressable Material) es una cerámica prensada "todo en uno" basada en la cerámica de recubrimiento de estructura fina VITA VM 9, acreditada en millones de casos clínicos. Es adecuada tanto para la técnica de prensado sin estructura (inlays/onlays, carillas y coronas) como para el sobreprensado de estructuras de dióxido de circonio.

Ventajas

Confección racional:

el amplio espectro de indicaciones (técnica de prensado sin estructura y técnica de sobreprensado) de VITA PM 9 permite confeccionar de forma rentable y segura las más diversas restauraciones, utilizando un programa de prensado idéntico y manteniendo al mismo tiempo un almacenamiento eficiente.

Seguridad clínica:

la cerámica VITA PM 9 ha sido desarrollada a partir de la cerámica de recubrimiento de estructura fina VITA VM 9, acreditada en millones de casos clínicos, y garantiza, por lo tanto, la máxima seguridad clínica.

Juego cromático natural:

especialmente las bolitas VITA PM 9 HT, de gran translucidez, convencen por su efecto camaleónico y aseguran un efecto cromático totalmente natural.

Propiedades típicas del diente natural:

las características dentales naturales de la cerámica VITA PM 9 se muestran, por ejemplo, en las superficies homogéneas, la elevada resistencia a la placa y el comportamiento similar al del esmalte.

Indicaciones

Técnica de prensado sin estructura:

Confección de inlays, onlays, carillas y coronas.

Técnica de sobreprensado:

Sobreprensado de estructuras de dióxido de circonio parcialmente estabilizado con itrio, coloreadas y sin colorear.

Colores

Opaque-/Translucent-pastillas:

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P y 3M3P

High Translucent-pastillas:

Colores de dentina: 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Colores de esmalte: EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP

VITA PM®9 Surtidos

VITA PM®9



**VITAPM®9 ACCESSORY KIT
EPM9ACCKIT**

Cantidad	Contenido	Material
1		Material de revestimiento VITA PM, 56 x 100 g
1	60 ml	vaso graduado
1	900 ml	Líquido de mezcla para material de revestimiento VITA PM
1	200 g	Sistema de revestimiento VITA PM, 3 piezas (anillo de mufa, base de mufa y plantilla de mufa)
1		Émbolo desechable VITA PM, 50 uds.



**VITAPM®9 HIGH TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9HTKIT**

Cantidad	Contenido	Material
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT
1		Guía de colores VITA PM gran translúcidas



**VITAPM®9 TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9TKIT**

Cantidad	Contenido	Material
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T
1		Guía de colores VITA PM translúcidas

VITA PM®9 Productos

VITA PM®9

Denominación	Ref.
VITA PM 9 Opak, 0M1P-O, 5 pcs.	EPM90M1PO
VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T, 5 pcs.	EPM90M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT, 5 pcs.	EPM90M2PHT
VITA PM 9 Opak, 0M2P-O, 5 pcs.	EPM90M2PO
VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T, 5 pcs.	EPM90M2PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT, 5 pcs.	EPM91M1PHT
VITA PM 9 Opak, 1M1P-O, 5 pcs.	EPM91M1PO
VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T, 5 pcs.	EPM91M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT, 5 pcs.	EPM91M2PHT
VITA PM 9 Opak, 1M2P-O, 5 pcs.	EPM91M2PO
VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T, 5 pcs.	EPM91M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M1P-O, 5 pcs.	EPM92M1PO
VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T, 5 pcs.	EPM92M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT, 5 pcs.	EPM92M2PHT
VITA PM 9 Opak, 2M2P-O, 5 pcs.	EPM92M2PO
VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T, 5 pcs.	EPM92M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M3P-O, 5 pcs.	EPM92M3PO
VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T, 5 pcs.	EPM92M3PT
VITA PM 9 Opak, 3M1P-O, 5 pcs.	EPM93M1PO
VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T, 5 pcs.	EPM93M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT, 5 pcs.	EPM93M2PHT
VITA PM 9 Opak, 3M2P-O, 5 pcs.	EPM93M2PO
VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T, 5 pcs.	EPM93M2PT
VITA PM 9 Opak, 3M3P-O, 5 pcs.	EPM93M3PO
VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T, 5 pcs.	EPM93M3PT
VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT, 5 pcs.	EPM9EN0PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT, 5 pcs.	EPM9EN1PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT, 5 pcs.	EPM9EN2PHT
VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT, 5 pcs.	EPM9ENDPHT
VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT, 5 pcs.	EPM9ENLPHT

Accesorios para Cerámica prensada



Descripción del producto

Material de revestimiento/líquido

Material de revestimiento con base de fosfato y apto para el calentamiento rápido, perfectamente adaptado a las pastillas de prensado VITA AMBRIA, con líquido que posibilita un control de la expansión y una fluidez exactos.

VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P: disponible como envase de 50 x 100 g
- VITA AMBRIA INVEST F: disponible como botella de 1 litro

Émbolos


Émbolos desechables para facilitar el proceso de trabajo, sin necesidad de dedicar tiempo al arenado y el precalentamiento.

- VITA AMBRIA PLUNGER: disponible en envase de 50 unidades (diámetro 13 mm)

Accesorios para Cerámica prensada Productos

Accesorios para Cerámica prensada

Denominación		Ref.
Émbolo desechable VITA PM, 50 uds.		E001
Sistema de revestimiento VITA PM, 3 piezas (anillo de mufla, base de mufla y plantilla de mufla), 100 g		E003
Sistema de revestimiento VITA PM, 3 piezas (anillo de mufla, base de mufla y plantilla de mufla), 200 g		E004
Guía de colores VITA PM 9 opacos		E005
Guía de colores VITA PM gran translúcidas		E009
Guía de colores VITA PM translúcidas		E010
Líquido de mezcla para material de revestimiento VITA PM, 900 ml		EEF900
Material de revestimiento VITA PM, 56 x 100 g		EEM100
VITA AMBRIA® INVEST F (revestimiento, líquido), 1000 ml		LAMIF1000
VITA AMBRIA® INVEST P (revestimiento, polvo), 50 x 100 g		LAMIP10050
VITA AMBRIA® PLUNGER (émbolo de prensado de un solo uso Ø 13 mm), 50 unidades		LAMP1350

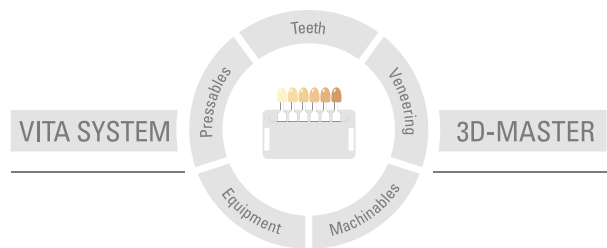

Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 02.2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik